

Antigenní rychlotest na nový koronavirus (SARS-Cov-2) (nosní výtěr)

Antigenní rychlotest pro detekci SARS-Cov-2 v nosním výtěru. Pro vlastní testování.

Před provedením testu si pečlivě přečtěte pokyny.

REF:K601416D Česky

◆ DODANÉ MATERIÁLY

<p>Testovací zařízení</p> <p>Antigenní rychlotest na nový koronavirus (SARS-Cov-2) (nosní výtěr). Antigenní rychlotest pro detekci SARS-Cov-2 v nosním výtěru. Pro vlastní testování. Před provedením testu si pečlivě přečtěte pokyny.</p> <p>REF:K601416D Česčina</p>	<p>Tryska</p>	<p>Extrakční zkumavka s pufrem</p>
<p>Příbalová informace</p>	<p>Sterilizovaný tampon</p>	<p>Sáček na biologický vzorek</p>
<p>Stojánek na zkumavky (balení 25 testů/sada obsahuje stojánek na zkumavky, balení 1 test/sada a 5 testů/sada používají jako stojánek na zkumavky samotnou krabičku s testy).</p>		
<p>Požadované materiály, které nejsou součástí dodávky</p>		
<p>Časovač</p>		

<p>Krok 1 Před zahájením testu si umyjte nebo očištěte ruce alespoň 20 sekund a ujistěte se, že jsou suché.</p>	<p>Krok 2 Pečlivě si přečtěte návod k použití. Antigenní rychlotest na nový koronavirus (SARS-Cov-2) (nosní výtěr). Antigenní rychlotest pro detekci SARS-Cov-2 v nosním výtěru. Pro vlastní testování. Před provedením testu si pečlivě přečtěte pokyny. REF:K601416D Česčina</p>	<p>Krok 3 Vyjměte jednu extrakční zkumavku, stáhněte zatavenou hliníkovou fólii na extrakční zkumavce a umístěte extrakční zkumavku do stojáčku na zkumavky nebo do otvoru v krabičce.</p>	<p>Krok 4 Rozbalte tampon. Upozornění: V případě, že se jedná o výtěr, je třeba provést kontrolu: Tampon by se neměl dotýkat ničeho jiného, jinak by mohlo dojít ke zfalšování výsledku.</p>	
<p>Krok 5 Mírně zakloňte hlavu. Zaveďte tampon asi 2 cm - alespoň celou měkkou špičkou tamponu - do levé nosní dírky. Jemně otočte tamponem nejméně pětkrát proti nosní stěně.</p>		<p>Krok 6 Stejný tampon vložte asi 2 cm - alespoň celým hrotem měkkého tamponu - do pravé nosní dírky. Opět jemně otočte tamponem nejméně pětkrát proti nosní stěně. Pozor: Pokud se tyčinka tamponu během odběru vzorku zlomí, použijte nový tampon.</p>		
<p>Krok 7 Ponořte měkký hrot tamponu do tekutiny. Otáčejte tamponem po dobu nejméně 15 sekund a zároveň tlačte jeho hlavici proti vnitřku zkumavky, aby se vzorek rozpustil v tekutině.</p>	<p>Krok 8 Nyní vytáhněte tampon z extrakční zkumavky a otřete jej o okraj zkumavky. Tampon vyhodte do sáčku na odpadky.</p>	<p>Krok 9 Našroubujte a utáhněte trysku na extrakční zkumavku.</p>	<p>Krok 10 Silně protřepejte extrakční zkumavku, aby se promíchala zkumavka a extrakční pufr.</p>	
<p>Krok 11 Otevřete fóliový sáček a vyjměte kazetu s testem. Zkontrolovanou kazetu s testem položte na rovný, čistý povrch. POZOR: Test proveďte do 60 minut po otevření fóliového sáčku.</p>	<p>Krok 12 Přidejte 3 kapky roztoku ze zkumavky pro odběr vzorku do jamky pro vzorek na kazetě.</p>	<p>Krok 13 Nastavte časovač na 10 minut. UPOZORNĚNÍ: Neodečítejte výsledek předem, ani pokud se již objevila čárka v kontrolní oblasti C.</p>	<p>Krok 14 Testovací materiál zlikvidujte v uzavřeném plastovém sáčku spolu s domovním odpadem, pokud existují místní předpisy, dodržujte je.</p>	<p>Krok 15 Po dokončení testu si důkladně umyjte ruce.</p>

◆ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

<p>Pozitivní</p>	<p>Negativní</p>	<p>Neplatný</p>
<p>Zobrazí se dvě červené čáry. Červená čára se objeví v kontrolní oblasti (C) a červená čára v testovací oblasti (T). Odštin se může lišit, ale pokud se objeví i slabá čára, měla by být považována za pozitivní. Pokud je výsledek testu pozitivní, musíte okamžitě izolovat. Pro získání laboratorního testu PCR se obraťte na služby pro testování koronavirů ve vašem státě nebo území. Držte se dál od ostatních lidí a izolujte se.</p>	<p>V kontrolní oblasti (C) se objeví pouze jedna červená čára a v testovací oblasti (T) se neobjeví žádná čára. Negativní výsledek znamená, že se ve vzorku nenacházejí žádné částice nového koronaviru nebo je počet virových částic pod detekovatelnou hranicí. Negativní výsledek však nevylučuje přítomnost viru COVID-19. Pokud máte příznaky, jako je horečka, kašel a/nebo dušnost. Prosíme, opakujte testování za 1-3 dny. I při negativním výsledku musíte nadále dodržovat příslušná hygienická a distanční pravidla.</p>	<p>V kontrolní oblasti (C) se neobjeví žádná červená čára. Test je neplatný, i když se v testovací oblasti (T) objeví červená čára. Nejpravděpodobnější příčinou selhání kontrolní čáry je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávná procedurální technika. Zkontrolujte postup zkoušky a opakujte zkoušku s použitím nového testovacího zařízení.</p>

◆ TESTOVACÍ POSTUP

